

CLEAR-ALIGNER

Klare Vorteile des überzeugenden Schienenkonzeptes

Vorteile für Sie und Ihre Praxis

- sofortige, kostengünstige Herstellung in Ihrer eigenen Praxis, im eigenen Labor
- vollkommene Behandlungskontrolle
- hochwertige, bioverträgliche Thermoplast-Schienen
- vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Zahnkorrekturen in hoher Qualität durch präzise, individuelle Passform
- praxisnahe CLEAR-ALIGNER-Schulungen
- digitales und analoges Infomaterial verfügbar
- jederzeitige Therapiekorrektur möglich

Vorteile für Ihre Patienten

- CLEAR-ALIGNER-Schienen sind fast unsichtbar, klar transparent
- hohe Bioverträglichkeit
- sprechen und lachen fast ohne jede Einschränkung
- hoher Tragekomfort, besonders für Erwachsene geeignet
- hohe Ästhetik und Passgenauigkeit
- einfache Hygiene, zur Reinigung leicht herausnehmbar



CLEAR-ALIGNER®

www.ca-clear-aligner.com

CLEAR-ALIGNER

... lachen ohne Einschränkung



Meine Zahnschiene ist fast unsichtbar

DAS PROGRAMM

Komplette Wertschöpfung in Ihrer Praxis

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mit ästhetisch hochwertigen Schienen hat sich zu einem wichtigen Therapiebereich in der aktuellen Kieferorthopädie, speziell in der Erwachsenenbehandlung, entwickelt.

Die einzelnen Komponenten des CLEAR-ALIGNER-Schienensystems geben Ihnen die Möglichkeit, die Schienentherapie von der Diagnose und Therapieplanung über die Herstellung der Set-Up-Modelle und letztlich deren Fertigung und Aktivierung selbst in Ihrer Praxis bzw. im eigenen Labor durchzuführen.

Gerne beraten wir Sie persönlich in Ihrer Praxis. Um die Vorteile des CLEAR-ALIGNER-Konzeptes näher kennen zu lernen, würden wir uns freuen, Sie bei einem unserer Schulungs- oder Fortbildungskurse begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen zu unseren Fortbildungskursen finden Sie im Internet unter www.scheu-dental.com, SCHEU-ACADEMY, Rubrik Kurse.


Indikationsbeispiele



Informationen, Komponenten, Neuheiten und Fortbildungskurse



CLEAR-ALIGNER®

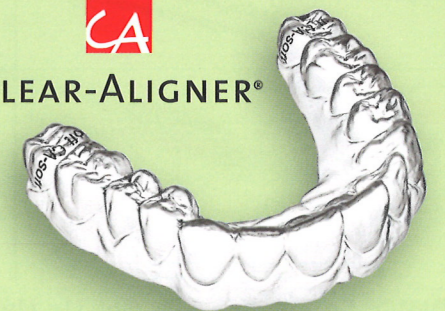

SCHEU

DIE CLEAR-ALIGNER KOMPONENTEN IM ÜBERBLICK

Set-Up Wachsstangen
Weiches, schrumpfungsaarmes Setzwachs zur Umstellung, gelb.

Set-Up Wachsblöcke
Mittelweiches, schrumpfungsaarmes Aufstellwachs zur Umstellung, rot.

CA®-SMART 3.0
Intelligente Software für schnelle und präzise Umstellungen in der CA®-Set-Up-Technik. In dieser Version ist jetzt die Software zur Nutzung des CA®-CHECKER integriert. Somit können Strecken- und Winkelmessungen des Set-Up komplett dokumentiert werden. Mit dem modifizierten Fotostativ ist zur Okklusalaufnahme jetzt auch die Frontalaufnahme möglich. Die erweiterte umfangreiche Projektverwaltung erleichtert die Patientenzuordnung. Die Darstellung auf dem Bildschirm erfolgt live durch ein Videosignal. Die CA®-SMART Software ist inkl. CA®-Webcam. Systemvoraussetzungen: ab Windows XP SP 3, USB 2.0 Anschluss, Maus mit Scrollrad. Grafikkarte mit Treiberunterstützung für OpenGL mind. 2.0 und DirectX mind. 9.0c.

CA®-Fotostativ
Mit Hilfe des stabilen, höhenverstellbaren Statives für die CA®-Webcam können Aufnahmen von okkusal und frontal reproduzierbar dokumentiert werden. Technische Voraussetzung als separates Zubehör der CA®-SMART 3.0 Software. CA®-Fotostativ wird inklusive Kalibrierungsplatte geliefert.

CA®-CHECKER
Set bestehend aus Software, digitalem Präzisionsmessgerät mit USB Anschluss, massiver Basisplatte aus hochglanzpoliertem Granit, Modellhalter, Libelle und CA®-Kugelfräse. Das Präzisionsmessgerät ist ausgestattet mit kapazitiven Neigungssensoren zum Ermitteln von Torque- und Angulationswerten vor und nach dem Umstellen an Set-Up Modellen. Systemvoraussetzung: ab Windows XP SP 3, USB 2.0 Anschluss

CA®-Folien
Hochwertige, transparente, hartelastische Folien für die schonend sanfte Korrektur von Zahnfehlstellungen mit ästhetischen Schienen nach dem CA®-System. Alle Folien tragen die original CA®-Kennzeichnung mit Stärkenangabe: soft (0,5 mm), medium (0,625 mm) und hard (0,75 mm).

CA®-Schienenetui
Handliches, verschließbares Etui zur Aufbewahrung und Mitnahme der CA®-Schienen, enthält im Set eine Retainerdose, drei Minigripbeutel sowie CETRON® Reinigungspulver.



DIMO® Scheiben
Stabile und flexible Ausarbeitungsscheiben zur Bearbeitung und Politur der CA®-Schienen, inklusive Mandrell.

Set-Up Handsäge
Abgewinkelter Bügel ermöglicht präzises und kontrolliertes Trennen der einzelnen Zahnsegmente.

CA®-Schleifset
6 Instrumente, inkl. Zurichtstein. Bestehend aus: Set-Up Trennscheibe, Diamant Trennscheibe und DIMO® PRO inkl. Mandrell, HM-Tricutter fein, Set-Up Modellfräse, CA®-Hartmetallfräse.

CA®-Farbstifte (rot/blau)
Für die Anzeichnung der Hartgipsmodelle zur Vermessung.

BLUE-BLOKKER®
Lichthärtendes, blau-transparentes Ausblockmaterial zum Versiegeln und Verblocken der Set-Up-Segmente. Mit optimalen Fließeigenschaften. Aushärtung im 380 – 470 nm Bereich.

SIL-KITT
Dauerplastisches, transparentes Silikonmaterial, speziell zum Ausblocken vor dem Tiefziehen der CA®-Schienen.

VECTOR® 40
Spezierschraube in Micro-Bauweise zur Herstellung von aktivierbaren CA®-Schienen, ermöglicht schnelle transversale Dehnungen. Mit Retentionsarmen zur sicheren Verankerung auf den CA®-Schienen mit Autopolymerisat.

CA®-TIP 1/CA®-TIP 2
Zwei Zangen für die CLEAR-ALIGNER Technik.
CA® TIP 1: Große kugelförmige Zangenspitze zum Einbringen von Retentionspunkten, zur Erhöhung der Friktion.
CA® TIP 2: Kleine kugelförmige Zangenspitze zum Formen von Aktivierungspunkten.

CA®-CYANO VENEER® FAST
Glasklarer, dünnflüssiger, schnell härtender Befestigungskleber zum randspaltsicheren Ankleben von CA®-Plastikknöpfchen auf CA®-Schienen.

CA®-Plastikknöpfchen
Klar-transparent zum Einhängen von Elastics in der CA®-Therapie.

CA®-Retainerdose
Attraktive Aufbewahrungsdosen für die CA®-Schienen.

CA®-Pipetten
Zur punktgenauen Dosierung mittels Mikrospitze von CA®-CYANO VENEER® FAST.

CA®-Minigripbeutel
Zur Weitergabe der CA®-Schienen an den Patienten. Können mit Adressfeld und Trageanweisungen beschriftet werden, verschließbar.

CETRON®
Schonendes Reinigungspulver zur dauerhaften Pflege und Reinigung der CA®-Schienen. Beutel mit je 15 g Pulver zum Auflösen in 150 ml Wasser.